

Anlage 21

Standardarbeitsanweisung Lagerung

1. Einsortieren der aufbereiteten Medizinprodukte

- Folien und Schalen in Schränke und Schubladen (trocken und staubdicht) ablegen
- Ultraschallaufsätze in der vorgesehenen Box lagern
- Ordnung so wählen, das Lagerdauer mit einem Blick zu erfassen ist

2. Älteres Sterilisations-gut auf Verfallsdatum regelmäßig überprüfen

- Lagerfristen:
 - Klarsichtsterilisationsverpackung einfach → 6 Monate
 - Doppelte Sterilgutverpackung: je nach Verpackung und Lagerungsart → bis zu 5 Jahren)

Unterweisung erfolgt und dokumentiert

Datum	Name des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin	Unterschrift